



The swiss rock ...

SWISS QUALITY LABEL +

easy-graft™

Toepassing

**easy-graft™ Preparation 1**

- open de ampule met BioLinker™
- open de spuit met korrels aan de bovenkant van de spuit

DS

**easy-graft™ Preparation 2**

- vul de Biolinker™ in de koker van de spuit

DS

**easy-graft™ Preparation 3**

- beweeg de plug van de spuit heen en weer zodat de de Biolinker™ goed gemengd is met korrels

DS

**easy-graft™ Preparation 4**

- plaats de plugger terug in de bovenkant van de Spuit (a)
- verwijder voorzichtig de plug aan de onderkant van de spuit (b)

DS

**easy-graft™ Preparation 5**

- voor gebruik verwijder overtollig BioLinker™ door het drukken van de Easy-graft™ massa tot aan het einde van de spuit

DS

**easy-graft™ Preparation 6**

- gebruik Easy-graft™ direct vanuit de spuit in het defect

DS

**easy-graft™ Preparation 7**

- modelleren met plat Instrument
- in contact met (lichaams-)vloeistof hardt easy-graft™ binnen enkele minuten uit tot een solide poreuse bot-implant

DS

**easy-graft™ Advantages 8**

- makkelijk gebruik door toepassing spuit
- optimaal vullen van een defect voor snelle genezing
- modellering van elk defect
- in contact met vloeistof wordt Easy-graft binnen enkele min (bot)hard

DS

Als de oppervlakte goed wordt verdicht ontstaat een deksel/bescherm laag die het ingroeien van bindweefsel tegen houdt.



www.dentasil.com  
info@dentasil.nl