

The swiss rock...



Het β -TCP granulaat voor alle toepassingen

SWISS QUALITY LABEL

easy-graft™

AAA

The "Triple A" of Bone Regeneration

Alle indicatie's



Alle patiënten



Alle gebruikers



Tijd-, materiaal- & kosten besparend

Direct deegachtig/pasteus injecteerbaar vanuit de spuit

Volledige kaak-opbouw mogelijk

100% puur synthetisch

100% resorbeerbaar en ombouw in autologe bot

Uitharding in enkele minuten


Geen membraan nodig bij kleine defecten

Stopt elke bloeding


De optimale bot regeneratie

Easy-graft toepassing

- Verwijder de bovenzuiger van de spuit
- Biolinker toevoegen
- Easy-graft toedienen
- Granulaat in het defect modelleren
- Wordt in Situ 'bot'-hard

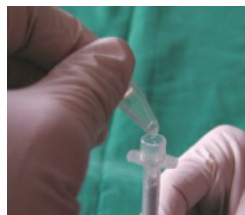

Als de oppervlakte goed wordt verdicht ontstaat een deksel/beschermlaag die het ingroeien van bindweefsel tegen houdt.

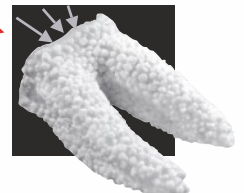

Het granulaat hecht aan elkaar en laat zich zo gemakkelijk modelleren
Overtollig granulaat met instrument verwijderen